

DÉMARRAGE RAPIDE

1.



Branchez le clavier à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis allumez votre ordinateur.

2.




Appuyez sur la touche Fn Lock située dans le coin supérieur droit du clavier pour activer les touches orange.

3.



Appuyez sur la touche « Magnifier ON » pour activer le mode Loupe.

Vous êtes désormais prêt à utiliser toutes les fonctions du clavier.

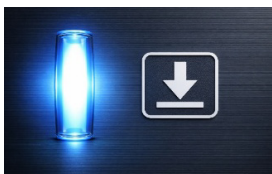


INTRODUCTION AUX TOUCHES **Fn**

Pour activer une fonction F1 à F12, appuyez sur la touche **Fn Lock** située dans le coin supérieur droit du clavier. Cela vous permet d'accéder directement à toutes les fonctions d'accessibilité associées aux touches **F**.



Le voyant LED « **Fn-Lock** » s'allume lorsque la fonction **Fn-Lock** est activée.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Fn** en même temps que la touche correspondante pour accéder temporairement à la fonction **Fn** de cette touche.

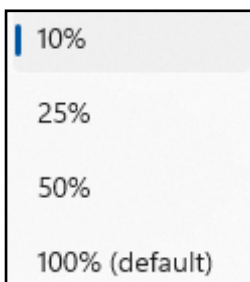F1**F2****F3**

FONCTIONNALITÉS D'ACCESSIBILITÉ

Appuyez sur cette touche pour ouvrir les **PARAMÈTRES DE LA LOUPE**. Vous pouvez ici régler les niveaux de zoom de la loupe, les incréments de zoom, configurer la loupe pour qu'elle s'active automatiquement au démarrage de Windows et modifier l'affichage et les options de lecture de la loupe.

Dans la section « Niveau de zoom » des paramètres de la loupe, cliquez sur la flèche du menu déroulant située à droite. Cela ouvre le menu « Incrément de zoom ». Nous vous recommandons de remplacer le paramètre par défaut par 10 % ou 25 %.

Fermez la fenêtre « Paramètres » en cliquant sur le « X » situé dans le coin supérieur droit pour fermer la fenêtre des paramètres de la loupe.

MODE AFFICHAGE EN PLEIN ÉCRAN AVEC ZOOM

Passez en mode plein écran. Lorsque vous effectuez un zoom avant, l'ensemble de l'écran est agrandi.

Cette fonction ne fonctionne que si la Loupe est activée !

MODE DE VISUALISATION AVEC ZOOM DE L'OBJECTIF

Passez en mode « Vue Loupe ». Déplacez la souris pour faire glisser une loupe sur l'écran.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F4

MODE AFFICHAGE DU DOCK

Passez en mode « Dock ». Une barre située en haut de l'écran affiche une vue agrandie de l'emplacement du pointeur.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F5

ACTIVER LA LOUPE ET ZOOMER

Chaque pression augmente le zoom selon l'incrément sélectionné autour de la zone où se trouve le curseur de la souris.

La première fois que vous appuyez sur cette touche, cela active la loupe !

F6

ZOOM ARRIÈRE

Le zoom arrière réduit le grossissement selon l'incrément sélectionné autour de la zone où se trouve le curseur de la souris.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F7

ZOOM 100%

Permet de basculer entre un zoom à 100 % et le grossissement défini.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F8

DÉSACTIVER LE GRANDISSEMENT

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F9

INVERSER LES COULEURS

Inversez les couleurs dans la zone agrandie pour réduire la fatigue oculaire ou améliorer la lisibilité du texte pour certaines personnes. Pour rétablir les couleurs normales, appuyez à nouveau sur la touche.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !

F10

MODE HAUT CONTRASTE

Modifie l'apparence de Windows et des applications Microsoft pour adopter un thème à contraste élevé. Lors de l'activation du mode Contraste élevé, un message vous rappellera que le mode Contraste élevé est sur le point d'être activé.

F11

SAISIE VOCALE

Ouvre l'outil de dictée, « Saisie vocale ».
Cliquez à l'intérieur du champ de saisie avec le curseur de la souris avant d'activer la « Saisie vocale ».

F12

LUNETTE DE LECTURE

Activer ou désactiver le lecteur avec loupe. Le lecteur avec loupe commencera la lecture à l'endroit où vous avez cliqué avec le curseur de la souris.

Cette fonction ne marche que si la Loupe est activée !